



GUARDARE IL MONDO, VEDERE OLTRE

ANTIRIFLESSO BRILLIANCE ZERO

INTRODUZIONE TECNICA



BRILLIANCE ZERO

Optovista Brilliance Zero è l'innovativo ed esclusivo sistema anti appannamento per lenti oftalmiche che risolve efficacemente tutti i problemi di utilizzo degli occhiali in situazioni di umidità estrema o di sbalzi di temperatura.

Lenti appannate: perchè?

L'appannamento è causato dalla condensazione del vapore acqueo contenuto nell'aria o emesso attraverso il nostro respiro su una superficie fredda.

Questo fenomeno nel caso delle lenti avviene perchè la tensione superficiale delle microgoccioline emesse quando respiriamo è molto bassa.

E più la tensione superficiale è bassa più il fenomeno dell'appannamento è accentuato.

Il trattamento Anti Riflesso e Anti Appannante BRILLIANCE ZERO ha un processo di produzione specifico che prevede in superficie uno strato molto sottile di una lega speciale applicata mediante un processo di evaporazione. Quest'ultimo strato diventa parte integrante del trattamento Anti Riflesso garantendo un'elevata tensione superficiale sulla faccia esterna della lente. Questo ovviamente come precedentemente spiegato riduce in modo significativo il fastidioso fenomeno dell'appannamento.




MASCHERINA

Evita il fastidioso appannamento degli occhiali dovuto all'utilizzo di dispositivi di protezione personale.



INTERNO ED ESTERNO

Elimina l'appannamento momentaneo quando si passa da un ambiente caldo ad uno freddo.

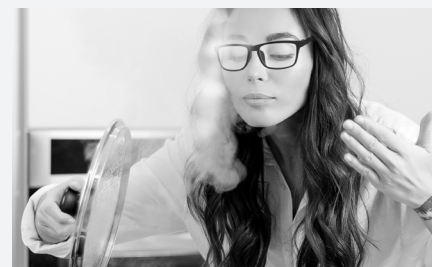

ARIA CALDA E FREDDA

Riduce l'appannamento dovuto all'esposizione a sorgenti di vapore.

Per preservarne le performances basterà poi riattivarlo con la microfibra Brilliance Zero.

Per questo motivo è necessario ogni giorno riattivare le sue proprietà con l'apposita microfibra BRILLIANCE ZERO.

La microfibra BRILLIANCE ZERO che viene consegnata con ciascuna coppia di lenti è, infatti, impregnata di una speciale soluzione riattivante.

Quotidianamente, quindi, la lente dopo un'accurata pulizia deve essere "trattata" con la sua specifica microfibra per circa 30 secondi, in questo modo tutti gli eventuali residui superficiali sono rimossi dalla lente e la struttura del trattamento Brilliance Zero viene completamente ripristinata. E per la normale pulizia dei lenti durante il giorno è possibile utilizzare una normale microfibra.

Il trattamento di ripristino va eseguito quotidianamente e qualora se ne individuasse l'esigenza.



BRILLIANCE ZERO

Seguire le seguenti istruzioni **prima** di consegnare l'occhiale al cliente, in questo modo il trattamento sarà già attivo.

01

- Rimuovere l'eventuale serigrafia dalla lente con alcol prima di consegnare l'occhiale al cliente.



02

- Pulire la lente con sapone neutro (non utilizzare detergenti) e risciacquare con acqua corrente.



03

- Asciugare completamente, dopodiché inumidire leggermente con la soluzione contenuta nella pipetta fornita nel kit per l'ottico.



04

- Attivare il trattamento con la microfibra Brilliance Zero contenuta nel kit per l'ottico.



05

- Riporre la microfibra Brilliance Zero nella sua busta dopo l'uso per conservarne l'efficacia.



06

- Terminare la pulizia con una microfibra asciutta.



Disponibilità

Brilliance Zero è ordinabile su tutte le tipologie di lenti di serie e di ricetta.
Disponibile anche sulle nuove AQT Ingenia.

Prezzo al pubblico

Il prezzo delle lenti con trattamento Brilliance Zero equivale al prezzo delle lenti di serie e/o ricetta con trattamento Hard Brilliance presenti nel catalogo attualmente in vigore.*

*Gamma sole e sport equivale al prezzo del trattamento Integra Sun Green.

BRILLIANCE ZERO	
SERIE	BRILLIANCE ZERO
• Orlite 1.50	79.00 €
• Orlite 1.50 Transitions Gen 8 (grigio - marrone)	121.00 €
• Orlite 1.60	112.00 €


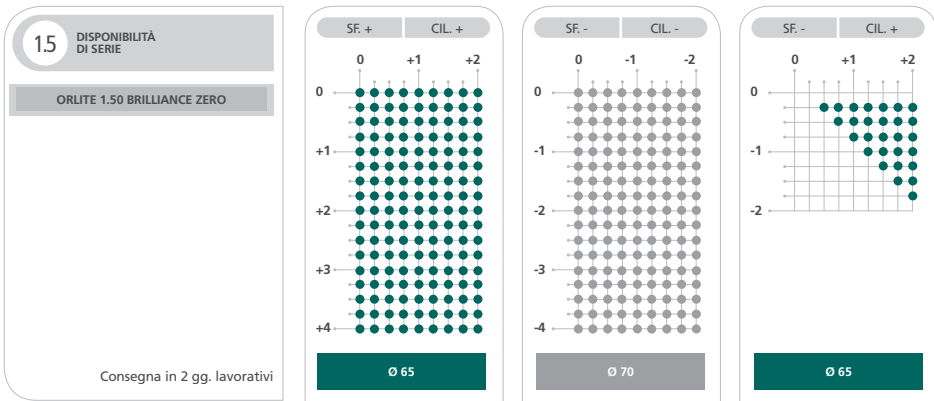


Tabelle disponibilità

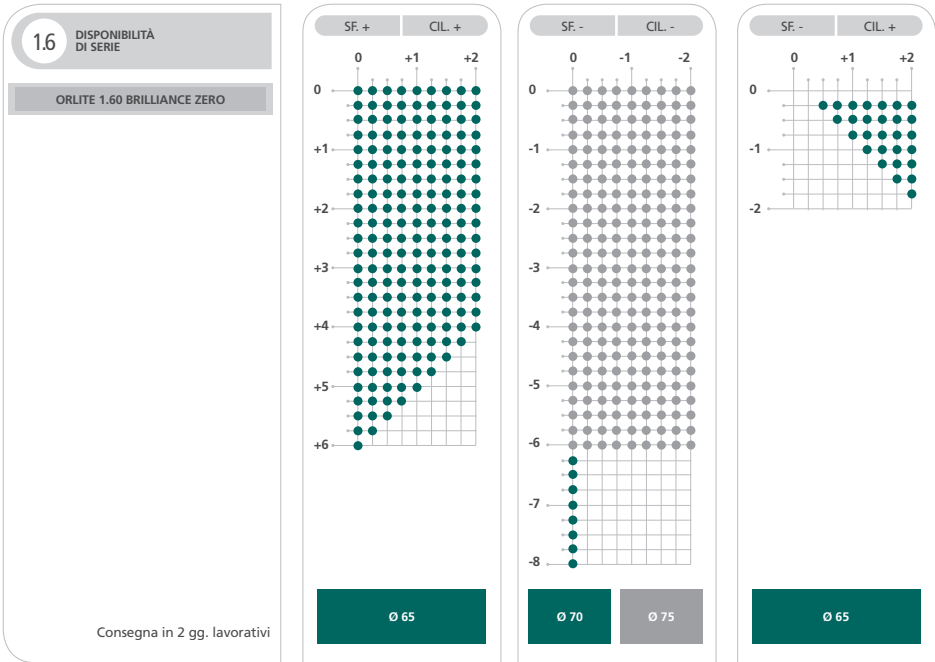

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

per maggiori informazioni non esitate a contattare
il vostro responsabile commerciale Optovista

optovista®

Tutti i contenuti di questa pubblicazione sono proprietà esclusiva e riservata del titolare e/o dei suoi aventi causa e/o di terzi soggetti ove indicati, e sono protetti dalle vigenti norme nazionali ed internazionali in materia di tutela dei diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale.

Via Commenda 1/2
40012 Calderara di Reno (BO)
Telefono: 051.727630
P.IVA: 01579131200

www.optovista.it



optovista®
